


使い方の説明

①

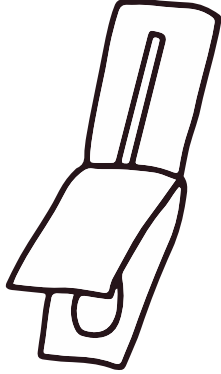

綿棒を取り出します


②



喉の奥の咽頭部分に届くように奥まで入れて検体を採取してください


鼻の奥の粘膜から検体を採取するので、少し上を向きまっすぐ鼻に綿棒を入れて採取して下さい

③

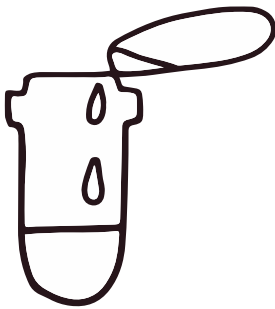


アンプボトルに入った検体液をスポイトボトルにうつす

④

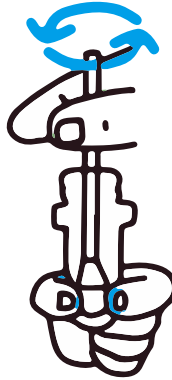


検体のついた綿棒をボトルの中で10回ほどくるくる回す

⑤

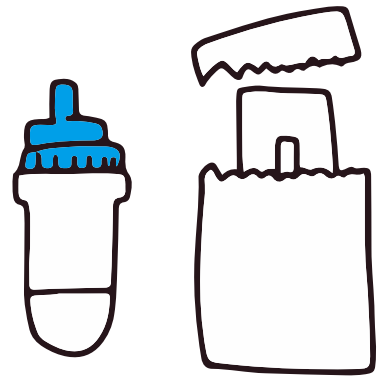

検体検査カードを開け、ボトルの蓋を閉める

⑥

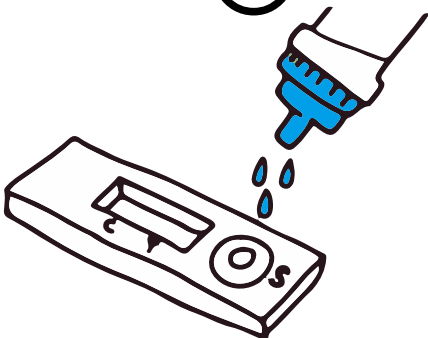

ボトルを逆さにして検体のついた液体をSマークの部分に3~5液以上垂らす

15分ほど経過するとラインが出てきます



陽性



検査キット周辺を消毒してビニール袋に2重に入れて破棄



陰性



そのままゴミ箱へ破棄



ラインが出ない場合は検体採取に失敗している場合がありますので、もう1セットお買い求めの上検査してください