

生命體徵監測儀


▶▶快速入門



使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

產品簡介

本產品是利用全球領先的光纖微震動傳感技術，實現無感無接觸、精準持續監測人體生命體徵數據，並進行健康數據分析，健康風險預警提醒；為心腦血管等慢病人群、新症人群、術後人群、獨居/空巢老人等提供持續的健康監測及預警服務；同時具備語音識別，語義理解和智能對話功能，能讓用戶簡單使用的智能產品。

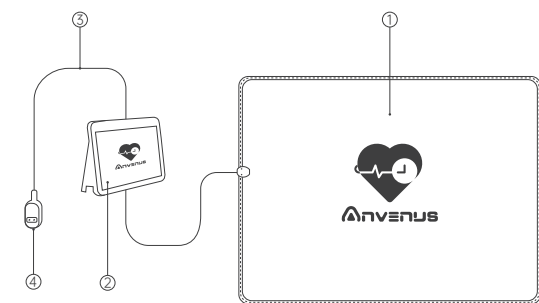

配件

- ① 床墊式傳感器
- ② AI語音交互觸摸屏
- ③ Type-c數據線
- ④ 電源適配器

▶ 主要功能



產品特色

數據智能化：通過實時顯示心動波形圖、呼吸波形圖、心率變異性圖，配合專業數據模型分析，智能給出合理建議，配合人工及數據療愈手段，提高睡眠質量，調節情緒。

實時預警：應急情況下，多端聯動，同時實時預警，配合多種方式觸達用戶。


遠程照護：家人健康情況及時瞭解，輕鬆實現遠程照護。視頻醫生遠程問診，小病小痛足不出戶即可解決。

舒曼波助眠：舒曼波大小根據睡眠狀況進行增減，以此達到治療睡眠問題。幫助精神性睡眠問題擺脫藥物依賴和物理治療依賴。

自定義提醒：用藥提醒、睡眠提醒、睡前養生操提醒、久未聯繫親屬視頻提醒，可多端同時設置方便實用。


產品細節圖

▶ AI語音交互觸摸屏

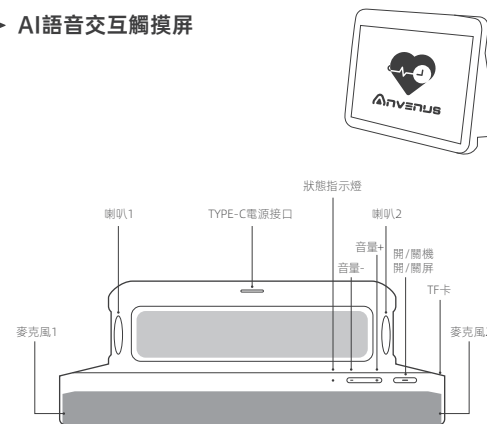


安裝指南

❶ 將床墊式傳感器放置在您習慣的睡眠區域的床墊下方（監測墊與床頭對齊放置）

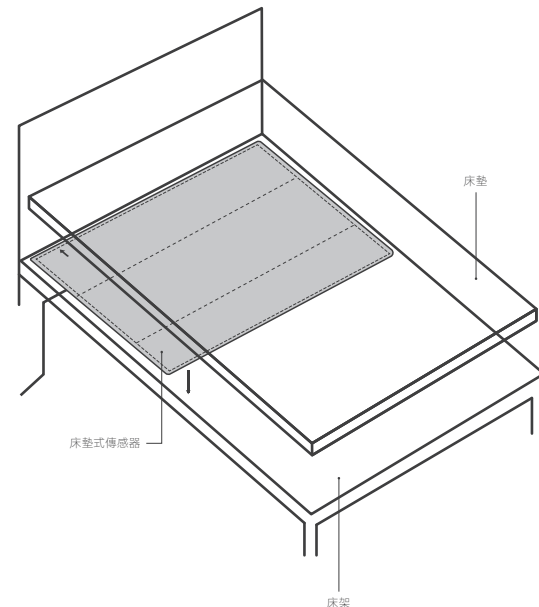


安裝指南

❷ 連接床墊式傳感器與AI顯示屏

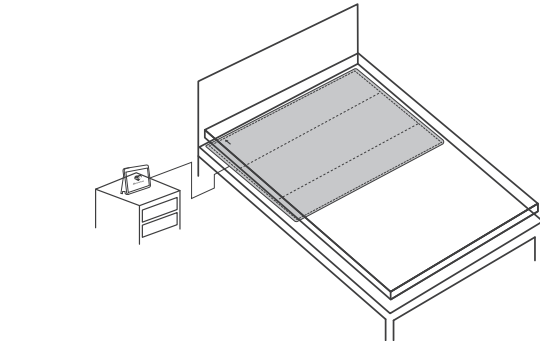


❸ 將AI顯示屏連接電源適配器，並接通電源

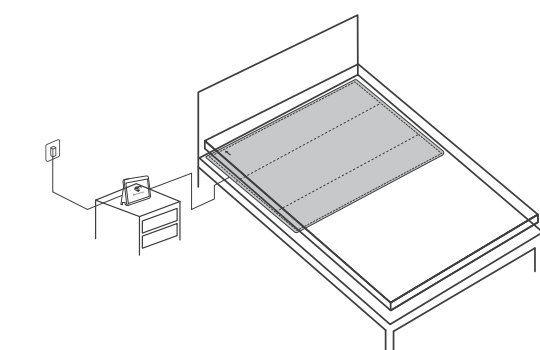

安裝指南

❹ 按下電源按鈕，啓動AI顯示屏

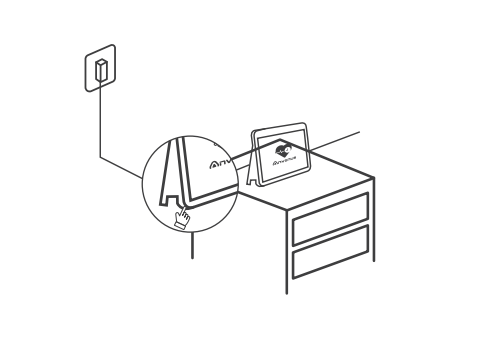

❺ 打開WiFi開關，連接合適的WiFi，即可使用



產品參數

▶ 床墊式傳感器

部件名稱	床墊式傳感器
產品尺寸	800*610*15mm
產品材質	尼龍面料、人造皮革、玻璃光纖
產品重量	1040g
產品承重	30kg~150kg
產品使用環境	放置在2cm~40cm 床墊下方
產品適用床環境	家居用床或醫療護理床
存儲溫度	-20℃~85℃
使用方式	需搭配AI顯示屏使用

產品參數

► AI顯示屏

部件名稱	AI顯示屏
操作系統	Android 11
CPU	RK3566
存儲器	2+16G
攝像頭	5Mp
產品尺寸	178*105*60mm
產品材質	TFT屏幕、ABS外殼
顯示器尺寸	7寸
供電方式	5V/2A電源適配器 + Type-c數據線
數據網絡連接方式	藍牙4.0/WiFi（802.11/b/g/n-2.4G）

香港凱銳普醫療科技有限公司

服務熱線：(852)3705 1135

官 網：http://www.krphk.com

地 址：灣仔告士打道128號祥豐大廈12樓CD室

注意事項

► 床墊式傳感器

- 傳感器內部使用高精度特種傳感光纖，需放置在平整穩固的表面。請將柔性床品放置在本產品之上，硬質或帶有尖銳凸起的床品將導致核心部件受損，監測結果也將出現誤差。
- 傳感器在安裝及挪動時，不得有大幅度折彎、強力揉搓、刮擦、撕扯等行為，否則將影響產品使用壽命。
- 傳感器為無電設計，無過熱、無起火風險，但仍不可與易燃火源或高熱源（如電熱毯等）重疊使用。
- 傳感器表面採用防水材料製作，但也需要保持在乾燥環境下使用，不能進行水洗操作；如有清洗需要，可用濕布清潔表面。
- 傳感器檢測靈敏度高，使用過程中請遠離機械震動源或噪聲源（如電動充氣墊、大功率音響等），否則將導致核心部件受損，以及監測結果出現誤差。
- 本產品不可當做家庭垃圾丟棄，須將廢棄設備攜至適當的回收處理點回收。
- 本產品僅限單人使用，使用者體重不得超過150kg。
- 切勿自行維修本產品，若產品無法正常工作，請及時撥打本公司服務熱線(852)3705 1135聯繫諮詢。

► AI顯示屏

- 本產品工作電源為AC100V~240V，安裝時確保接地良好，並避免和大功率電器設備連接同一電源插頭。
- 請使用乾燥、柔軟的布（不含揮發性物質）擦拭AI顯示屏。
- 本產品如果長時間不使用，請拔掉電源插頭。
- 本產品不可取代專業醫療建議，不提供任何醫療告警功能。使用者及照護人不可將本產品提供的心率、呼吸速率及睡眠報告等相關數據用作醫療用途。若遇身體不適，請及時前往專業醫療機構就診，照護人切不可因本產品忽略對使用者的照顧。
- 本說明書及注意事項僅供用戶參考，武漢凱銳普醫療科技有限公司將根據產品升級進度實時更新相關內容，並擁有最終解釋權。

常見問題分析

問題	排除方式
適用床墊的厚度	建議5-40CM，床墊厚度小於5CM可能會造成床墊式傳感器損壞，不可直接放置在床單下。
感覺實時監測不準確	若周圍環境存在震動干擾，可能會導致離床、心率、呼吸判斷不準確的問題；其次，非常規方式使用會影響數據的準確性，如坐在床墊式傳感器上，或者未按說明書方式安裝設備，請儘量排除周圍環境的干擾，躺臥在床墊式傳感器的上方。
手機APP顯示設備離線	檢查顯示屏是否連接網絡，保證網絡可以正常使用。
適用的體重範圍是多少	30kg< 體重<150kg（8cm厚床墊下測試數據），體重輕建議使用薄床墊。
適用的體重範圍是多少	床墊式傳感器使用的是光纖材料，本質無源，無輻射。
如何下載手機APP	在各大應用商店中搜索“安福星”APP下載安裝。
如何進行親情關注	在“屏顯終端-個人中心-基本信息”中找到綁定碼，然後在手機APP上“我的-新增親情關注-輸入綁定碼”即可完成操作。
AI顯示屏觸摸失靈，點擊無反應	清理屏幕表面，重啟設備。如重啟後無法恢復，請聯繫經銷商。
AI顯示屏黑屏	請查看是否開機，請查看是否未連接電源，請長按電源鍵，重啟設備，如無法恢復，請聯繫經銷商。

使用環境及保養

- 遠離潮濕，潮濕水氣過重會造成電子零件故障。
- 使用期間確保無其他振動源作用在床上。
- 不使用本品時請關閉AI顯示屏或降低顯示屏亮度，顯示屏使用時間過長易導致晶體老化。
- 如顯示屏處於潮濕環境中，請務必將其置於乾燥環境中蒸發水分，否則可能導致液晶電極腐蝕，並造成永久性損壞。
- 若顯示屏表面有污跡，在確保顯示器已斷電的情況下，可用沾有少許水的軟布輕輕擦拭，切勿將任何液體直接噴灑在本品上。

▲ 警告



保修條款

本產品有效保修期限為自出售之日起一年。產品實行三包政策：產品自售出之日起7日內發生功能故障，可退換貨或修理。產品正常使用狀況下，若在保修期內出現故障，均可獲得免費售後維修服務。

本產品的保修不適用於：

- 非本公司生產的產品；
- 因自然災害等不可抗力（如地震、火災等）原因造成的產品故障或損壞；
- 因人為原因（自行拆卸、更改任何元件、未按照產品安裝及使用說明書要求安裝、使用、保管、輸入不合適電壓電流等）造成的產品故障或損壞；
- 用戶自行塗改、撕毀產品條形碼；
- 設備、部件已經超出保修期。

需要對故障產品進行保修時，請提供填寫完整的保修卡及故障描述詳情。

保修規則：

- 用戶據實填寫保修卡內容，並加蓋本公司公章後方可有效。
- 服務及收費：保修期滿或在保修範圍外的維修，本公司將根據成本標準進行收費。
- 若遺失保修卡，恕不補發，請妥善保管。

保 修 卡

保 修 服 務 卡			
客戶姓名		聯繫方式	
產品型號		保修時間	
購買日期			
聯繫地址			
故障描述			

- 此卡請妥善保管，如須客戶服務事項請出示此卡。