



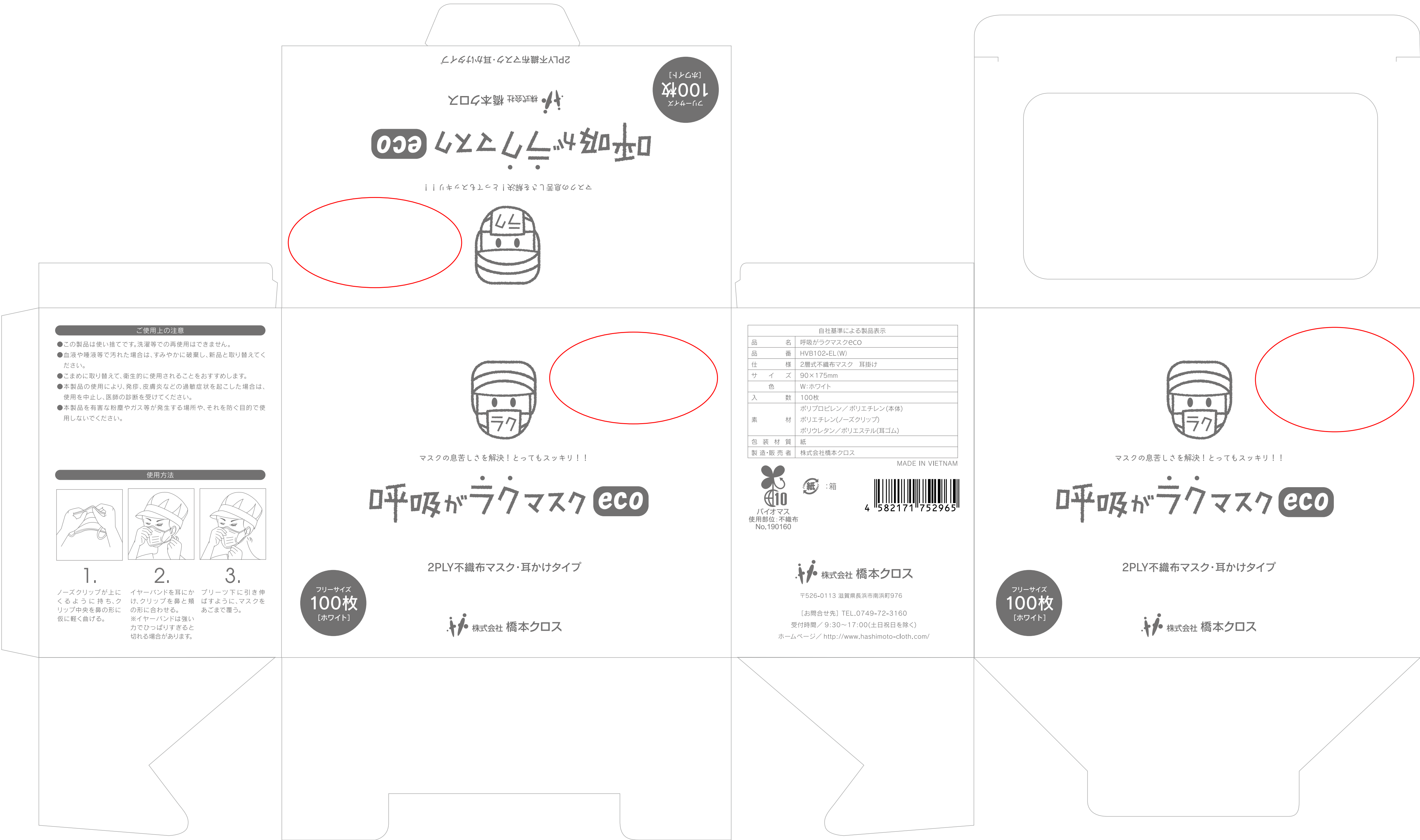

呼吸がラクマスク eco

マスクの息苦しさを解決！とってもスツキリ！！

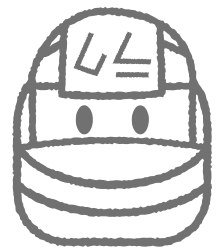

マスクの息苦しさを解決！とってもスツキリ！！

呼吸がラクマスク eco

2PLY不織布マスク・耳かけタイプ

株式会社 橋本クロス

フリーサイズ
100枚
[ホワイト]


2PLY不織布マスク・耳かけタイプ

株式会社 橋本クロス

ご使用上の注意

- この製品は使い捨てです。洗濯等での再使用はできません。
- 血液や唾液等で汚れた場合は、すみやかに破棄し、新品と取り替えてください。
- こまめに取り替えて、衛生的に使用されることをおすすめします。
- 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 本製品を有害な粉塵やガス等が発生する場所や、それを防ぐ目的で使用しないでください。

使用方法

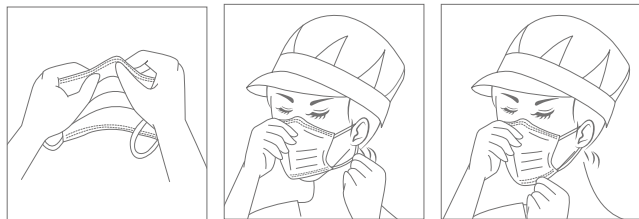

1.

ノーズクリップが上に
くるように持ち、ク
リップ中央を鼻の形に
仮に軽く曲げる。

2.

イヤーバンドを耳にか
け、クリップを鼻と頬
の形に合わせる。

※イヤーバンドは強い
力でひっぱりすぎると
切れる場合があります。

3.

ブリーツ下に引き伸
ばすように、マスクを
あごまで覆う。

フリーサイズ
100枚
[ホワイト]

自社基準による製品表示

品名	呼吸がラクマスクeco
品番	HVB102-EL(W)
仕様	2層式不織布マスク 耳掛け
サイズ	90×175mm
色	W:ホワイト
入数	100枚
素材	ポリプロピレン/ポリエチレン(本体) ポリエチレン(ノーズクリップ) ポリウレタン/ポリエステル(耳ゴム)
包装材質	紙
製造・販売者	株式会社橋本クロス

MADE IN VIETNAM



紙 :箱



株式会社 橋本クロス

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町976

【お問合せ先】TEL.0749-72-3160

受付時間／9:30～17:00(土日祝日を除く)

ホームページ／<http://www.hashimoto-cloth.com/>

マスクの息苦しさを解決！とってもスツキリ！！

呼吸がラクマスク eco

2PLY不織布マスク・耳かけタイプ

株式会社 橋本クロス

フリーサイズ
100枚
[ホワイト]