


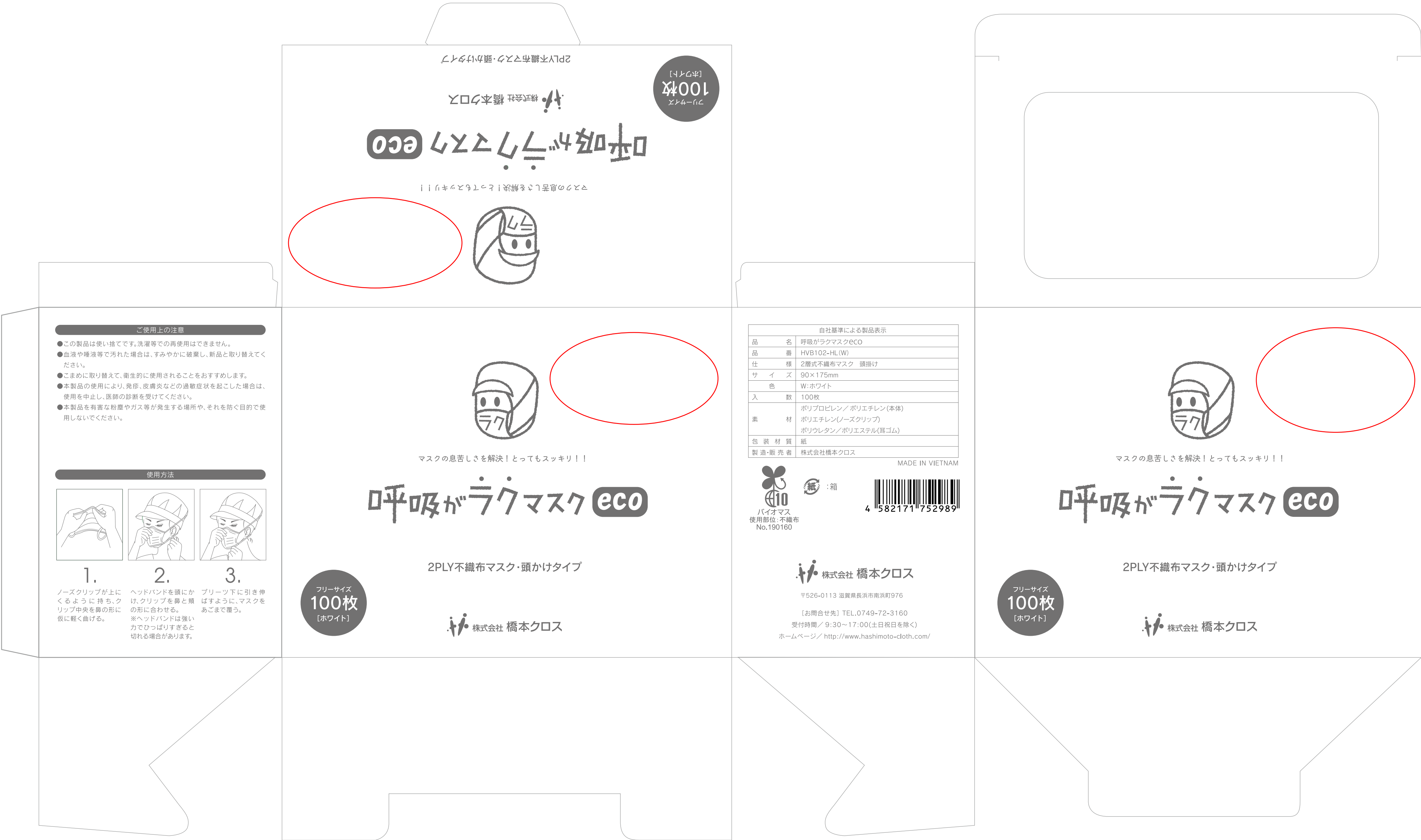

フリーサイズ  
100枚  
[ホワイト]

株式会社 橋本クロス

呼吸がラクマスク eco

マスクの息苦しさを解決！とってもスッキリ！！



マスクの息苦しさを解決！とってもスッキリ！！

呼吸がラクマスク eco

2PLY不織布マスク・頭かけタイプ


株式会社 橋本クロス

フリーサイズ  
100枚  
[ホワイト]

#### ご使用上の注意


- この製品は使い捨てです。洗濯等での再使用はできません。
- 血液や唾液等で汚れた場合は、すみやかに破棄し、新品と取り替えてください。
- こまめに替えて、衛生的に使用されることをおすすめします。
- 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 本製品を有害な粉塵やガス等が発生する場所や、それを防ぐ目的で使用しないでください。

#### 使用方法

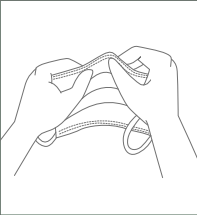

1.

ノーズクリップが上にくるように持ち、クリップ中央を鼻の形に仮に軽く曲げる。

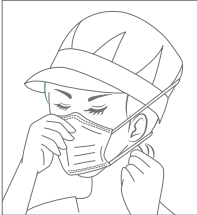

2.

ヘッドバンドを頭にかかけ、クリップを鼻と頬の形に合わせる。

※ヘッドバンドは強い力でひっぱりすぎると切れる場合があります。



3.

ブリーツ下に引き伸ばすように、マスクをあごまで覆う。

| 自社基準による製品表示 |                                                             |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 品名          | 呼吸がラクマスクeco                                                 |  |
| 品番          | HVB102-HL(W)                                                |  |
| 仕様          | 2層式不織布マスク 頭掛け                                               |  |
| サイズ         | 90×175mm                                                    |  |
| 色           | W:ホワイト                                                      |  |
| 入数          | 100枚                                                        |  |
| 素材          | ポリプロピレン／ポリエチレン(本体)<br>ポリエチレン(ノーズクリップ)<br>ポリウレタン／ポリエステル(耳ゴム) |  |
| 包装材質        | 紙                                                           |  |
| 製造・販売者      | 株式会社橋本クロス                                                   |  |

MADE IN VIETNAM



紙 : 箱



株式会社 橋本クロス

〒526-0113 滋賀県長浜市南浜町976

【お問合せ先】 TEL.0749-72-3160

受付時間／ 9:30～17:00(土日祝日を除く)

ホームページ／ <http://www.hashimoto-cloth.com/>

マスクの息苦しさを解決！とってもスッキリ！！

呼吸がラクマスク eco

2PLY不織布マスク・頭かけタイプ

株式会社 橋本クロス

フリーサイズ  
100枚  
[ホワイト]